



无针输液小接头

佛山市昊宁康医疗器械有限公司
地址：佛山市禅城区城门口西路1号1205
电话：0757-82369566
传真：0757-82160736
网址：www.haolangmed.com
邮箱：harvey.liuhao@haolangmed.com

ISO13485:2016
Certified Quality System

FDA
REV.2015-B



无针输液小接头

无针输液接头适用于无需使用注射针或穿刺器与输液器、输液瓶、输血袋和溶液袋之间建立连接通路。无针输液接头可以用于连接不同的医疗器械,但连接的方式是相同的。



- 表面光滑,长期留置的过程中不会对皮肤形成压痕和压伤
- 硅胶阀膜,不含弹簧等任何金属,可做MRI检查
- 平滑的接顶部,易消毒,可有效防止细菌定植
- 直通的液体流道,在输注的过程中可保证药物及血液制品的完整性,提高治疗效果
- 死腔容量小,只需较少的冲管流量,就可清除腔内血液或药物的残留
- 无针连接,可避免治疗过程中被针刺伤而引起感染
- 良好的生物相容性,可广泛应用于不同的人群,输注不同的药物
- 接口尺寸标准化,可连接带标准接口的外延医疗器械,带螺口的接头使之更加牢固

01 连接前消毒



使用消毒酒精擦拭无针输液接头表面,让它风干。

02 连接注射器



小心地将无针输液接头连接注射器或者外延器械,将注射器或者其他鲁尔接头笔直压进。

03 关闭止流夹




分离之前关闭止流夹

04 脱开注射器



逆时针扭转即可以分离

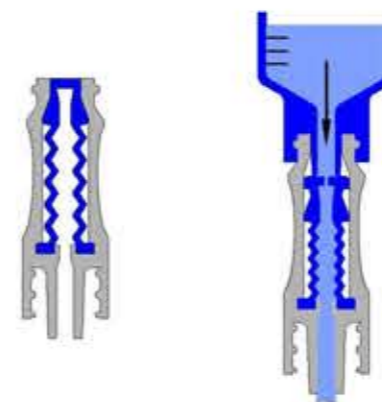

关闭状态

使用时